

## Svagt alkalisk, enzymbaseret, flydende specialmiddel til blødt som mellemhårdt vand

### Beskrivelse

Suma Med Enzyme er et svagt alkalisk, flydende specialmiddel, baseret på enzymer. Den specielle formulering giver fremragende resultater til fjernelse af besmudsning på kirurgiske instrumenter i blødt som mellemhårdt vand.

### Egenskaber

Anvendes i en lang række instrumentvaskemaskiner samt almindelige opvaskemaskiner, og er specielt formuleret til fjernelse af besmudsning på kirurgiske instrumenter, narkose- og endoscoopudstyr i instrumentvaskemaskiner og almindelige opvaskemaskiner. Indeholder proteinnedbrydende enzymer. Fjerner besmudsning i blødt som mellemhårdt vand.

### Fordele

- Effektivt over for besmudsning og indtørret blod
- Den koncentrerede formulering giver fremragende brugsøkonomi
- Enzymatisk rengøring er skånsom ved instrumenter, som er særlige pH-følsomme
- Brugervenlig emballage gør dunkskift nemt

### Brugsanvisning

Isæt sugelansen i dunken og doseringsudstyret vil styre den korrekte dosering. Produktet kan ligeledes anvendes manuelt. Under arbejdet skal der anvendes handsker (PVC, nitril, latex eller neopren).

### Dosering

Suma Med Enzyme doseres normalt gennem Diversey's automatiske doseringsudstyr eller tilsvarende udstyr i en koncentration på min. 1 g/ltr. vand. Det anbefales, at produktet doseres ind i maskinen startende ved en temperatur på 20-25°C med en vasketid på 5-10 min. Enzymerne i Suma Med Enzyme er vaskeaktive op til 55-60°C.

*\*Denne dosering er i henhold til optimale betingelser, anbefalinger kan variere, kontakt venligst din Diversey konsulent for anvisninger.*

### Tekniske data

pH-værdi (ufortyndet): ~ 7  
pH-værdi (brugskoncentration): ~ 7  
Relativ vægtfylde (g/cm<sup>3</sup>; 20°C): ≈ 1.13

*Ovenstående data er typisk for en normal produktion og bør derfor ikke anses som specifikationer.*

### Sikker håndtering og opbevaring

Udførlig vejledning i håndtering og bortskaffelse af produktet findes i separat sikkerhedsdatablad på [sds.diversey.com](https://sds.diversey.com). Opbevares i lukket originalemballage. Undgå ekstreme temperaturer. Kun til professionelt brug/specialister.

### Emballagestørrelser

Varenummer	Varenavn	Platform
7511762	Suma Med Enzyme 2x5L W3605	Automatisk dosering
7512082	Suma Med Enzyme 200L W1779	Automatisk dosering

[www.diversey.com](https://www.diversey.com)

© 2022 Diversey, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. 28/01/2022 da-DK (P01150)

