

Actimove® Sling

Armslynge



- Let at bruge
- Let at justere
- Behagelig at benytte



Actimove® Sling

Armslynge

Actimove Sling er et komfortabelt immobiliserings system til skulder, albue og håndled. Kombinationen af en slynge med velcrolukning giver både patient og personale en let tilpasning af armslyngen.

Applikationer

- Traumer på håndled, albue og skulder
- Armslynge i kombination med gipsbandage

Produkt applikation

- Klip den ønskede længde af rullen
- Påsæt velcrolukning i begge ender
- Lav en løkke i nærheden af albuen
- Før sløjfen bagom ryggen og over den modsatte skulder
- Før slyngen rundt om patientens håndled, og juster håndens stilling ved at fæstne velcroen mod slyngen
- Som alternativ kan en enkelt sløjfe monteres rundt om nakken med velcrolukning – se fig. 4 alternativ til ovenstående eksempel

Actimove Sling har fordele iforhold til andre produkter på markedet :

- 24 meter polstret materiale i en let tilgængelig dispenser pakke
- Stretch fri materiale, der holder armen i den ønskede position
- Velcrolukningen giver let justering og positionering af arm
- Slyngens bredde forbliver den samme under brugen, hvilket forhindrer ubehag i området omkring nakken

Reference	Indhold	Rækker til
72859-18	Slynge: 5.5cm x 12meter (x2) Velcrolukning: 2 x 14	(A) 14 dobbelte slynger (fig.3) eller (B) 20 enkel slynger (fig.4)

Applikation



A



B

