

Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus

Den med de 3 stikdybder




Accu-Chek® Safe-T-Pro Plus er den eneste engangsfingerprikker med 3 forskellige stikdybder



1. Fjern den sterile beskyttelsehætte

Drej den lille beskyttelsehætte af. Brug ikke fingerprikkeren, hvis beskyttelsehætten allerede er fjernet, da den måske ikke er steril mere.

En indbygget sikkerhedsmekanisme sikrer, at fingerprikkeren kun kan bruges én gang - derved undgås risiko for smittefare.

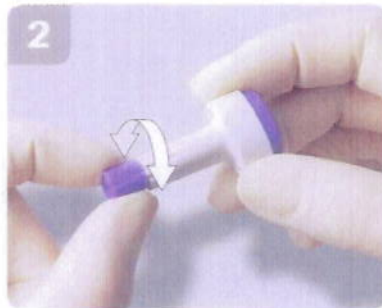

2. Vælg stikdybde

Accu-Chek® Safe T-Pro Plus giver mulighed for 3 justerbare stikdybder til forskellige prøvestørrelser og hudtyper.

Vælg den ønskede stikdybde ved at dreje indstillingsringen.

Stikdybden er forudindstillet til middel stikdybde.




3. Udtag bloddråbe

Pres fingerprikkeren mod siden af indstiksstedet, og tryk på den lille udløserknop.



Vælg den af de 3 stikdybder, der passer til den individuelle hudtype og den ønskede prøvestørrelse.

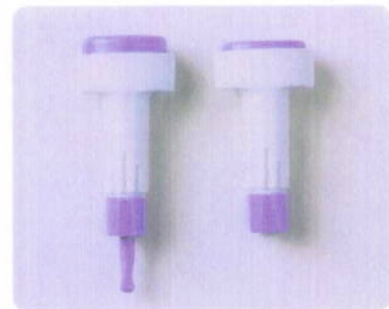

En indbygget sikkerhedsmekanisme sikrer, at fingerprikkeren kun kan bruges én gang - derved undgås risiko for smittefare.

Fakta:

Passer til forskellige hudtyper og prøvestørrelser med de 3 justerbare indstillinger:

Lille stikdybde: 1,3 mm
Middel stikdybde: 1,8 mm
Stor stikdybde: 2,3 mm

Forudindstillet til middel stikdybde

Kan bruges neonatalt

Det ergonomiske design gør det let at holde på fingerprikkeren

Lancetten har speciel slibning og diameter (23 G; 0,65 mm), hvilket gør blodprøvetagningen så godt som smertefri

Safe-T-Teknologi garanterer øget sikkerhed og betyder bl.a.:

Indbygget sikkerhedsmekanisme sikrer, at fingerprikkeren kun kan bruges én gang

Lancetten trækkes automatisk ind efter brug, hvilket mindsker risikoen for krydskontamination

Indbygget modstand i udløserknappen er med til at sikre, at lancetten ikke udloses ved et uheld