

VÆSKETERAPI


# Skyllevæsker fra Fresenius Kabi

Irriflex®

Microspol®

Octavia®

Careflex®

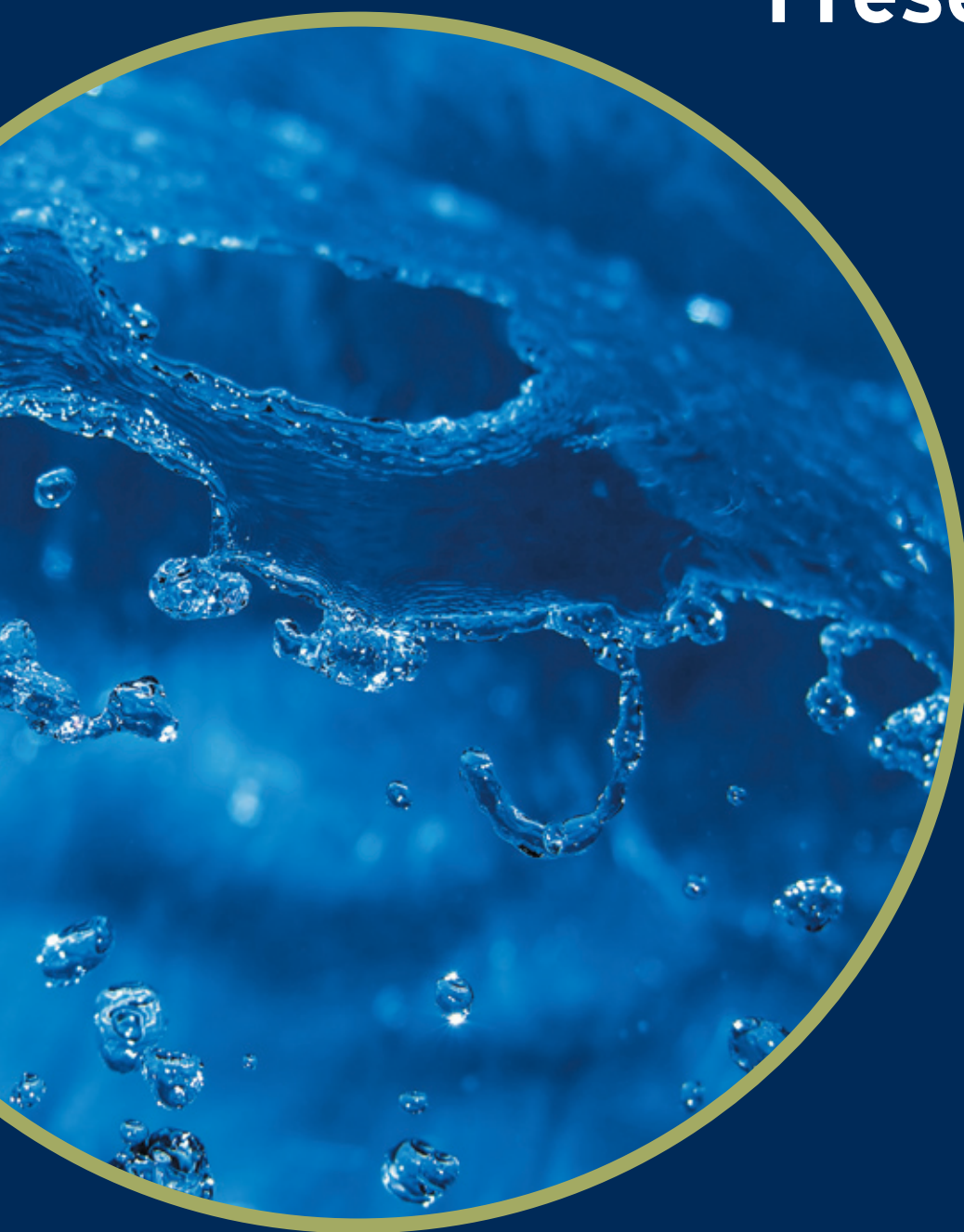

**FRESENIUS  
KABI**

caring for life



## Irriflex® 120 ml harmonikaflaske

### Brugervenlig

- Skylning med et enkelt greb
- Installation og aspiration gennem et lukket system
- Reduceret risiko for kontamination pga. færre til- og frakoblinger

### Anvendelsesområde


- Urologisk skylning, instillation og aspiration
- Øreskylning
- Sår- og fistelskylning

### Holdbarhed


- Opbevares ved stuetemperatur
- Fra produktionsdato: 3 år
- Efter anbrud: skal anvendes straks

### Produkter


- Klorhexidin 0,2 mg/ml
- Natriumklorid 9 mg/ml
- Sterilt vand

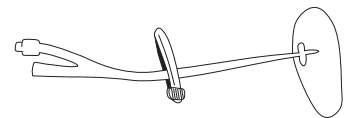


1. Urinblæren tømmes.  
Kateteret lukkes med klemme

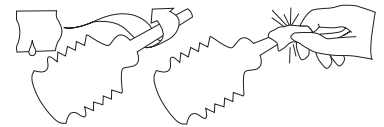


2. Halsen af flasken desinficeres. Toppen brækkes af og beholderen kobles til kateteret

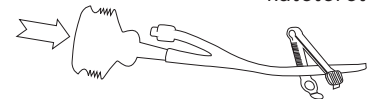

3. Klemmen åbnes og væsken instilleres ved en enkel sammenpresning af harmonikaflasken

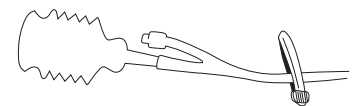

4. Hvis det ønskes, kan væsken beholdes i blæren ved at kateteret lukkes med klemmen

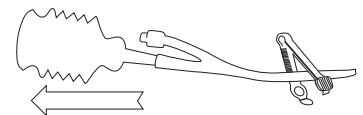

5. Blæren tømmes ved at trække beholderen ud til sin oprindelige facon, således at væsken aspireres tilbage



## Careflex® 3 liters kirurgisk skyllevæske

### Brugervenlig

- Nem håndtering som følge af posens fleksibilitet
- Forstærket ophæng
- Posen klapper helt sammen efter tømning
- Stødsikker
- Uden latex

### Holdbarhed

- Opbevares ved stuetemperatur
- Fra produktionsdato: 4 år
- Efter anbrud: Skal anvendes straks

### Produkter

- Natriumklorid 9 mg/ml til spike
- Purisol til spike. Purisol:
  - En blanding af mannitol 0,54% og sorbitol 2,7%
  - Elektrolytfri og således egnet til brug ved diatermi
  - Forårsager ikke hæmolyse ved absorption
  - Ved absorption dannes ikke toksiske metabolitter
  - Mannitol har udtalt diuretisk effekt
  - Sorbitol elimineres hurtigt fra plasma
  - Ideel skyllevæske til brug ved TUR-B, TUR-P og gynækologiske procedurer m.m.

### Anvendelsesområder

- Skyllevæske til kirurgi

### Miljøvenlig

- Uden PVC. Fremstillet af polypropylen, der nedbrydes til CO<sub>2</sub> og vand ved forbrænding

### Økonomisk i brug

- Affaldsvolumen og vægt er mindre end andre beholdere og sikrer derved en lille mængde affald
- Minimalt restvolumen

# Microspol™

## 30 ml ampul



### Brugervenlig

- Klar til brug, separate ampuller
- Praktisk "twist off" top
- Oval facon, let at klemme sammen
- Jævn stråle, let at kontrollere

### Anvendelsesområder

- Skylning af øjne, små sår, kompresser og instrumenter

### Holdbarhed

- Fra produktionsdato: 3 år
- Efter anbrud: Skal anvendes straks
- Opbevares ved stuetemperatur

### Produkt

- Natriumklorid 9 mg/ml

# Octavia®

## Plastflaske i 250, 500 og 1000 ml



### Brugervenlig

- Tydelig volumenskala
- Forseglingsring brydes, når flasken åbnes
- Klar og gennemsigtig plast
- Kan opbevares i varmeskab ved 40° C i 6 måneder
- Ottekantet plastflaske, der giver et sikkert greb
- Jævn stråle uden skvulp

### Anvendelsesområder

- Skylning af kompresser og instrumenter og sår (natriumklorid)

### Holdbarhed


- Fra produktionsdato: 3 år
- Efter anbrud: 24 timer
- Opbevares ved stuetemperatur

### Produkter

- Natriumklorid 9 mg/ml
- Sterilt vand

# Miljøvenlige skyllevæsker

Alle vore beholdere til skyllevæsker er fremstillet af miljøvenlig polypropylenplast, der kan genbruges og brændes. Det sterile vand er pyrogenfrit og destilleret og opfylder den Europæiske Farmakopé's krav om sterilisering ved 121° C.

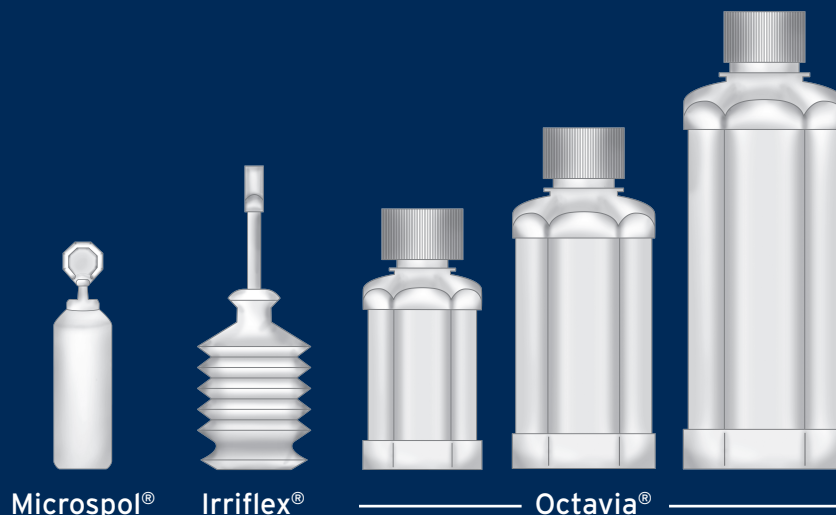

## Fakta om skyllevæsker fra Fresenius Kabi

Indhold i beholder	30 ml	120 ml	250 ml	500 ml	1000 ml	3000 ml
Type	<b>Microspol</b> Plastampul	<b>Irriflex</b> Harmonika- flaske	<b>Octavia</b> Plastflaske	<b>Octavia</b> Plastflaske	<b>Octavia</b> Plastflaske	<b>Careflex</b> Infusions- pose
Pakningsstørrelse	20 x 30 ml	10 x 120 ml	20 x 250 ml	12 x 500 ml	9 x 1000 ml	4 x 3000 ml
Holdbarhed fra produktion*	3 år	3 år	3 år	3 år	3 år	4 år
Holdbarhed i varmeskab ≤ 40°C	6 måneder	6 måneder Klorhexidin: 1 uge	6 måneder	6 måneder	6 måneder	14 dage ved 37° C
Holdbarhed efter anbrud	Anvendes straks	Anvendes straks	24 timer	24 timer	24 timer	Anvendes straks
<b>VARENUMRE</b>						
Natriumklorid 9 mg/ml	209319	808287	808261	808279	882167	Til spike 1337161
Sterilt vand		800567		808246	808253	
Klorhexidin 0,2 mg/ml		801018				
Purisol						Til spike 2563161

Skylllevæsker er CE-mærkede. Anvendes til operationer i ledhuler, uterus og blære. Endvidere til skylning af sår, øjne, kompresser mv. Skylllevæsker må ikke anvendes IV eller SC.

Sterilt vand lever op til Ph.Eur., monografi for "Water for Injections"

\*Opbevaret ved stuetemperatur



**FRESENIUS  
KABI**

caring for life

Fresenius Kabi  
Telefon 3318 1600  
www.fresenius-kabi.dk